

DERMACLINIC 8



DERMACLINIC 8



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Bienvenido a poder adquirir lo último en tecnología de nuestra empresa: DERMACLINIC 8.

DERMACLINIC 8 es un nuevo dispositivo médico de belleza cutánea mínimamente invasiva de alta gama que combina tecnología de matriz de RF + microneedle aislante + matriz de puntos. El dispositivo, está equipado con 4 configuraciones de cabezales diferentes intercambiables (12pines, 24pines, 40pines y nanocristal), y el sistema se puede ajustar libremente para establecer la cabeza de cristal aislante para penetrar en la piel a diferentes profundidades del tejido objetivo (entre 0,5-7 mm), proporcionando un tratamiento mínimamente invasivo para la remodelación del tejido adiposo subcutáneo profundo a 8 mm, efecto térmico que penetra el tejido subcutáneo hasta 7 mm + 1 mm adicional de profundidad, dirigido a la remodelación del colágeno y la coagulación del tejido adiposo.

La tecnología Burst Mode RF única de DERMACLINIC 8 despliega automáticamente la energía de RF a múltiples niveles de profundidad de tratamiento en un ciclo. La capacidad de dirigir secuencialmente el tejido en tres niveles a intervalos de milisegundos para tratar 3 capas de piel a la vez acorta significativamente el tiempo de tratamiento, minimiza el daño a la piel y mejora la uniformidad del tratamiento, brindando a los médicos soluciones nuevas para el rejuvenecimiento, regeneración y renovación de la piel, permitiendo tratamientos personalizados de cuerpo completo fraccionados.

El DERMACLINIC 8 es más profundo que cualquier dispositivo de microneedling de RF en el mercado actual.



DERMACLINIC 8



PRINCIPIO DEL FUNCIONAMIENTO

DERMACLINIC 8 es un tratamiento fraccional mínimamente invasivo que combina microneedles y energía de RF. Bajo el control del sistema electrónico, docenas de agujas aisladas penetran rápidamente en la epidermis al mismo tiempo, emiten energía de RF desde la punta de la aguja y luego salen rápidamente de la piel. La energía de RF penetra profundamente en la piel a través de pequeñas agujas, causando un daño mínimo, abriendo canales de absorción en la piel para que los productos nutricionales puedan ingresar y desencadenar la respuesta natural de curación del cuerpo. En ese momento, la estimulación térmica generada por la RF estimula el mecanismo de autoreparación de la piel, mientras liquida y destruye las células grasas, contrae una gran área de tejido blando y estimula la producción de tejido fibroso y colágeno, reduciendo así la grasa, remodelando y tensando la piel. Además, la RF puede destruir la secreción de las glándulas sebáceas, inhibir la inflamación, eliminar las bacterias del acné, reducir la secreción de grasa, mejorar significativamente los poros grandes y tratar eficazmente el acné inflamatorio, entre otros; para pieles ásperas y flácidas, líneas finas y arrugas, marcas de acné, cicatrices, estrías y otros síntomas diferentes para el cuidado personalizado de la piel.

La penetración de DERMACLINIC 8 abre el canal de absorción rápido de la piel y puede introducir directamente líquido reparador, antioxidantes y otros medicamentos en la capa profunda de la piel, lo que puede potenciar aún más la acción de los ingredientes activos y los medicamentos, reparar profundamente la piel y lograr el efecto de 1+1>2.



DERMACLINIC 8



VENTAJAS:

1. Diseño de doble mango: amplio rango de tratamiento.
2. Varias especificaciones de cabezales: 12 pines, 24 pines, 40 pines, cabeza de nanocrystal.
3. Proporciona la terapia fraccional de RF más profunda: que puede penetrar en el tejido subcutáneo hasta 8 mm.
4. Realiza una operación humanizada: la profundidad se puede ajustar entre 0,5 y 7 mm, la profundidad de la aguja se puede ajustar libremente y se puede utilizar en pieles de cualquier grosor.
5. Modo Burst original: tecnología de calentamiento subcutáneo segmentado profundo, tratamiento de superposición de múltiples niveles en un solo punto, entrega de energía uniforme y estable.
6. Dispositivo de cabezal aislada "super afilado + película de baño de oro ultra alta + diseño cónico"; El cuerpo de la aguja es de 0,22 mm y se vuelve gradualmente más delgado hacia la parte inferior. El daño a la epidermis causado por la punta de aguja de 0,1 mm es mínimo, evitando así la pigmentación de la piel y prácticamente sin dolor ni sangrado. Mayor seguridad y eficacia.

APLICACIONES:

1. Eliminación de arrugas: líneas finas, patas de gallo, líneas en la frente, surcos nasolabiales, líneas del cuello, etc.
2. Rejuvenecimiento y embellecimiento facial, regeneración de la piel, firmeza y levantamiento.
3. Remodelación de grasa y colágeno, mejora de la celulitis, reducción de estrías y mejora de la textura de la piel.
4. Reparación posparto: estrías (abdomen), marcas de hinchazón (glúteos, piernas).
5. Rejuvenecimiento de la piel: mejora de la textura desigual o áspera de la piel, textura opaca y rojez de la piel; reducción de los poros grandes.
6. Eliminación de cicatrices: hoyos de acné y marcas de acné, cicatrices de depresión por acné, cicatrices de quemaduras.
7. Tratamiento del acné: especialmente eficaz en el tratamiento del acné activo.
8. Desodorización: tratamiento del olor en las axilas y la hiperhidrosis axilar.
9. Mantenimiento regular de la piel.

DERMACLINIC 8



ESPECIFICACIONES:

CARACTERISTICA	DESCRIPCION
Producto	DERMACLINIC 8
Pantalla	10.4"
Cabezales	12 pins, 24 pins, 40 pin, Nanocristal
Profundidad	0.5-7mm
Output Frequency	4MHz
Operating Voltage	220v/50Hz
Power	10-300W
Peso	28.4kg